



ATTENTION

Lisez d'abord ceci

Guide de démarrage rapide

Numéros des pièces
MON-VTS42SDI-MD
MON-VTS42SDI-MT
MON-VTS52SDI-MD
MON-VTS52SDI-MT

Tenez compte des points suivants : Le Manuel d'utilisation de ce moniteur peut être téléchargé à partir du site www.vtsmedical.com. Cliquez sur **PRODUCTS (PRODUITS)**, puis sur **DOCUMENTATION** ; trouvez, dans la table, le numéro de pièce du moniteur, puis cliquez sur l'icône **DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)**.

Étape 1 : Déballage du carton


Le carton contient les articles suivants :

- 1 moniteur HD à écran large VividImage
- 1 cordon d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 câble DVI
- 1 câble VGA
- 1 câble S-Video
- 8 vis de montage
- 1 CD pour la configuration de l'écran tactile (MON-VTS42SDI-MT et MON-VTS52-SDI-MT)
- 1 Guide de démarrage rapide (ce document-ci)

Si un de ces articles manque, veuillez appeler le Service à la clientèle au 877-VTS-1788.

Étape 2 : Montage du moniteur

Le moniteur peut être monté en utilisant les huit vis fournies. Dévissez les huit vis du couvercle arrière. On vous recommande d'utiliser les huit vis lorsque vous montez le moniteur avec le kit de montage au mur (non fourni). Vous devez utiliser au moins quatre des vis, soit dans les quatre trous du centre, soit dans les trous aux quatre du grand rectangle. Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le kit pour le montage au mur.

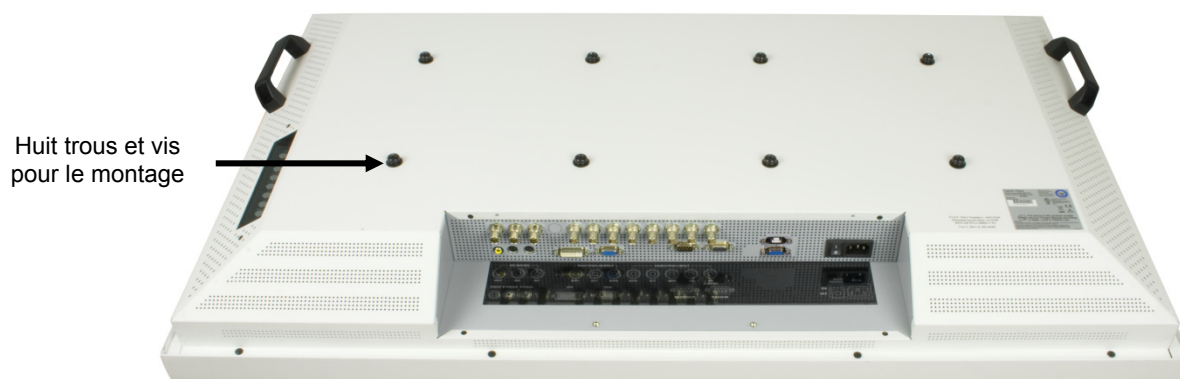


Étape 3 : Connexion des entrées vidéo

Le ou les câbles d'entrée vidéo doivent être connectés aux ports correspondants à l'arrière du moniteur, tel qu'indiqué ci-dessous. Les entrées suivantes sont disponibles :

Nom	Type de connexion
Entrée VGA (RGB)	D-Sub 15 broches (x1)
Entrée DVI	DVI-D (x1)
Entrée Y/Cb/Cr	Mini Din 8 broches (x1)
Entrée S-Video	Mini Din 4 broches (x1)
Entrée vidéo	Fiche RCA (x1)
Entrée HD-SDI (en option)	Connecteur BNC (x3)
Entrée RGBSync (en option)	Connecteur BNC (x8)
Contrôle RS-232 (Entrée/Sortie)	D-Sub 9 broches
Contrôle USB pour écran tactile (MON-VTS42SDI-MT et MON-VTS52SDI-MT uniquement)	USB-A
Contrôle série RS-232 pour écran tactile (MON-VTS42SDI-MT et MON-VTS52SDI-MT uniquement)	D-Sub 9 broches
Entrée du commutateur et de l'alimentation en courant alternatif	Entrée de l'alimentation c.a.

Entrée des câbles

Ces ports ne sont disponibles que sur les moniteurs MON-VTS42SDI-MT et MON-VTS52SDI-MT

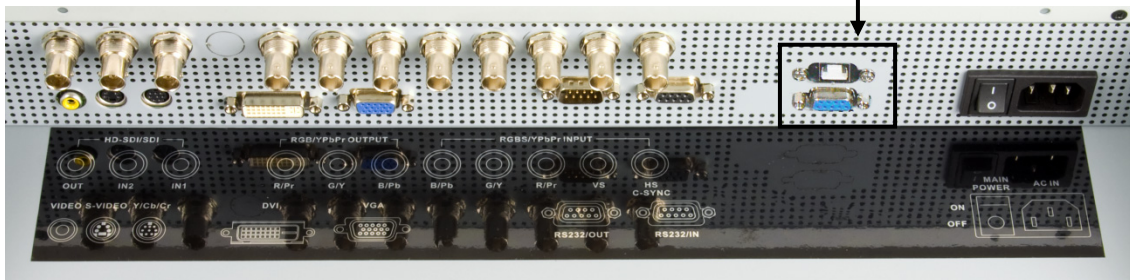

Étape 4 : Connexion du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise à trois broches à l'arrière du moniteur. Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise de courant et mettez le commutateur d'alimentation sous tension.

Entrée : 100-240 V c.a ~ 3 ampères 50/60 hertz



I Sous tension

O Hors tension

