



ATTENTION

Lisez d'abord ceci

Guide de démarrage rapide

Numéro de pièce
MON-VTS19-0T

Tenez compte des points suivants : Le Manuel d'utilisation de ce moniteur peut être téléchargé à partir du site www.vtsmedical.com. Cliquez sur **PRODUCTS (PRODUITS)**, puis sur **DOCUMENTATION** ; trouvez, dans la table, le numéro de pièce du moniteur, puis cliquez sur l'icône **DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)**.



Moniteur tactile Optical Touch de 19 po.

Étape 1 : Déballage du carton

Le carton contient les articles suivants :

- 1 moniteur à écran tactile Optical Touch VividImage®
- 1 pied peint
- 1 bloc d'alimentation
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble USB
- 1 CD de configuration de la fonction tactile
- 1 Guide de démarrage rapide

Si un de ces articles manque, veuillez appeler le Service à la clientèle au 877-887-1788.

Étape 2 : Montage du moniteur

Le moniteur est présenté avec un pied étant donné qu'il est habituellement utilisé comme moniteur de bureau.

Mail il est également possible de le monter sur un bras porteur. Il y a un gabarit de trous à l'arrière du moniteur (voir la figure 1) conforme au standard de montage des appareils VESA (Video Electronics Standards Association). Pour installer le moniteur sur un bras porteur, vous aurez besoin de 4 vis métriques de 4 mm ou 10 mm de longueur (non comprises), selon l'épaisseur de la plaque de montage. Utilisez des vis plus longues pour les supports dont les plaques de montage sont plus épaisses. Le support de montage est vendu séparément.

Utilisez les vis pour mettre en place le moniteur sur le support de montage, soit à la dimension du rectangle interne du gabarit (75 mm), soit à celle du plus grand rectangle externe (100 mm).

Mise en garde pour les utilisateurs qui montent le moniteur VividImage® sur un système de gestion des équipements de salle d'opération et/ou sur un bras porteur pour équipement :

Si le moniteur VividImage® doit être monté sur un bras porteur et/ou un système de gestion des équipements, le fournisseur du bras devrait avoir déjà installé les câbles requis à l'intérieur du bras.

Étape 3 : Montage du moniteur sur un bras porteur et connexion des sources de vidéo et d'alimentation

1. Deux (2) personnes sont requises pour installer le moniteur VividImage® sur un bras porteur.
2. Avant de procéder au montage du moniteur sur le bras, enlevez le pied avec un tournevis à tête cruciforme.
3. Une personne doit tenir et supporter le moniteur pendant que l'autre installe le moniteur sur le bras.
4. Une personne doit faire l'alignement du moniteur avec les trous de montage, pendant que l'autre installe physiquement le moniteur sur le support VESA installé sur le bras porteur.
5. Après avoir installé le moniteur, enlevez le couvercle de câbles et connectez le ou les câbles vidéo (fournis par le client) et le cordon d'alimentation aux ports correspondants à l'arrière du moniteur. Les ports du moniteur sont clairement identifiés (voir la figure 1). Vous pouvez voir une photographie des sources vidéo possibles dans la figure 2.
6. Le couvercle de câbles doit être remis en place avec les vis fournies.
7. Le moniteur devrait s'allumer automatiquement dès que les câbles sont connectés.

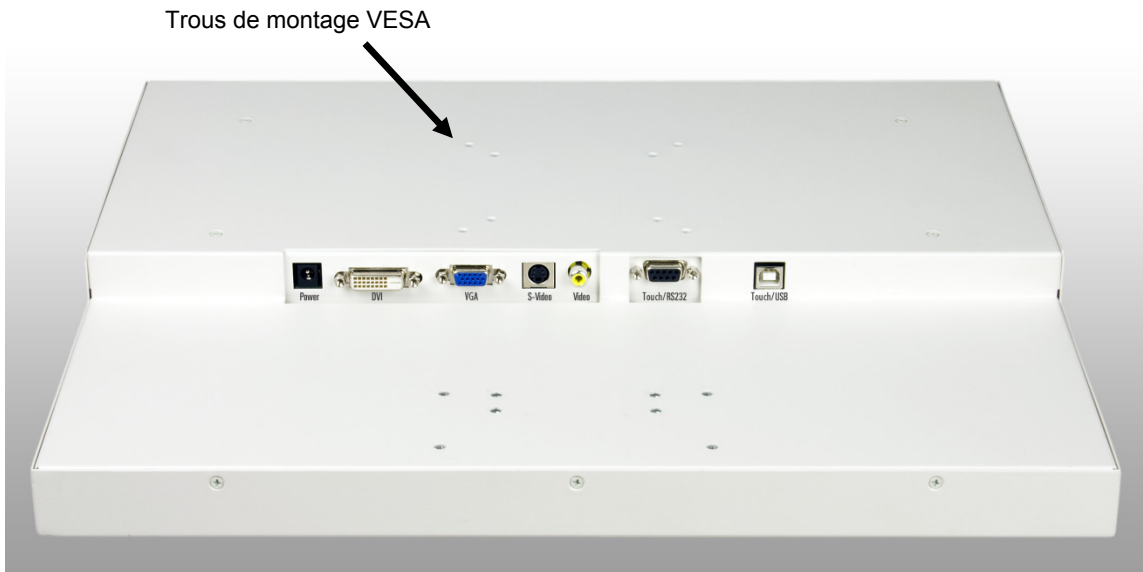


Figure 1 : Vue arrière du moniteur VividImage®

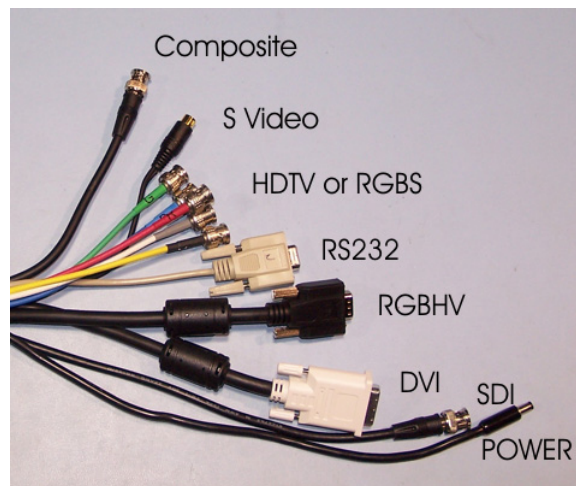


Figure 2 : Exemples de connexions et prise d'alimentation des sources vidéo*

* À des fins d'illustration uniquement. Les câbles et cordon fournis avec l'appareil peuvent être différents de ceux présentés sur cette photographie.



VTS MEDICAL SYSTEMS®

VividImage® est une marque déposée de VTS Medical Systems, LLC