



ATTENTION

Lisez d'abord ceci

Guide de démarrage rapide

Numéros des pièces

Tenez compte des points suivants :

Le Manuel d'utilisation de ce moniteur peut être téléchargé à partir du site www.vtsmedical.com. Cliquez sur **PRODUCTS**, puis sur **DOCUMENTATION** ; trouvez, dans la table, le numéro de pièce du moniteur, puis cliquez sur l'icône **DOWNLOAD**.

MON-VTS24HD2
MON-VTS24HD2M
MON-VTS26HD2
MON-VTS26HD2M

MON-VTS24HD2R
MON-VTS24HD2MR
MON-VTS26HD2R
MON-VTS26HD2MR

Étape 1 : Déballage du carton

Le carton contient les articles suivants :

- 1 moniteur HD VividImage®
- 1 couvercle de câbles (vissé à l'arrière du moniteur)
- 1 cordon d'alimentation*
- 1 bloc d'alimentation*
- 8 vis de montage (vissées à l'arrière du moniteur)
- 1 Guide de démarrage rapide (ce document-ci)

Si un de ces articles manque, veuillez appeler le Service à la clientèle de VTS au 877-VTS-1788.



Étape 2 : Montage du moniteur

Le gabarit de trous qui se trouve à l'arrière du moniteur (voir Figure 1) est conforme au standard de montage des appareils VESA (Video Electronics Standards Association). Le moniteur est livré avec huit vis qui se vissent à l'arrière du moniteur. Quatre de ces vis ont ½ po. de longueur et les quatre autres mesurent ¾ po. Enlevez toutes les vis et utilisez un groupe de quatre vis pour monter le moniteur sur le support, soit dans le gabarit de trous carrés intérieur (75 mm) ou le gabarit extérieur (100 mm). Utilisez les quatre vis plus longues pour les supports dont les plaques de montage sont plus épaisses. Le support est vendu séparément.

Mise en garde pour les utilisateurs qui montent le moniteur VividImage sur un système de gestion des équipements de salle d'opération et/ou sur un bras porteur pour équipement :

Si le moniteur VividImage doit être monté sur un bras porteur et/ou un système de gestion des équipements, le fournisseur du bras devrait avoir déjà installé les câbles requis à l'intérieur du bras.

Étape 3 : Montage du moniteur sur un bras porteur et connexion des sources de vidéo et d'alimentation

1. Deux (2) personnes sont requises pour installer le moniteur VividImage sur un bras porteur.
2. Une personne doit tenir et supporter le moniteur pendant que l'autre installe l'appareil sur le bras.
3. Une personne doit faire l'alignement du moniteur avec les trous de montage, pendant que l'autre installe physiquement le moniteur sur le support VESA installé sur le bras porteur.
4. Après avoir installé le moniteur, enlevez le couvercle des câbles et connectez le ou les câbles vidéo (fournis par le client) et le cordon d'alimentation* aux ports qui conviennent à l'arrière du moniteur. Les ports du moniteur sont clairement identifiés (voir Figure 1).
5. Le couvercle de câbles doit être remis en place avec les vis fournies.
6. Si le numéro de la pièce *ne se termine pas* par un « R », le moniteur devrait s'allumer automatiquement dès que les câbles sont connectés. Si le numéro de la pièce se termine par un « R », veuillez consulter l'étape 4 ci-dessous, Connexion de l'alimentation.

* Fourni avec les appareils dont les numéros sont MON-VTS24HD2, MON-VTS24HD2M, MON-VTS26HD2 et MON-VTS26HD2M.

Trous de montage VESA

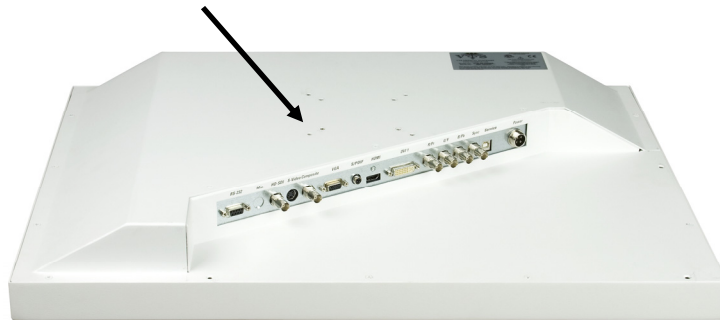


Figure 1 : Vue arrière du moniteur VividImage®, 24 et 26 po.
(illustré sans le couvercle de câbles)

Étape 4 : Connexion de l'alimentation

Remarque importante : Aucun bloc d'alimentation n'est fourni avec les pièces dont les numéros sont les suivants :

MON-VTS24HD2R
MON-VTS26HD2R
MON-VTS24HD2MR
MON-VTS26HD2MR

L'utilisateur final doit fournir un bloc d'alimentation de qualité médicale adéquat avec une sortie d'au moins 6,25 ampères à 24 volts. Le connecteur à basse tension qui se connecte au moniteur doit être un connecteur Calrad Electronics, pièce n° 30-453. Seul un technicien expérimenté en électronique doit procéder au soudage. Dès que le moniteur est connecté à une source d'alimentation, il s'allume automatiquement.

Voir l'embrochement ci-dessous :

Calrad Electronics, Inc.
Connecteur n° 30-453

Broche	Signal
1	Terre (négatif)
2	Terre (négatif)
3	24 V CC (positif)
4	24 V CC (positif)



N° 30-453

Les broches 1 - 4 sont clairement identifiées sur le connecteur



VividImage est une marque déposée de VTS Medical Systems, LLC